



# Da 28 giorni post fecondazione. Senza strumenti. Rapido.

## IDEXX Rapid Visual Pregnancy Test

Il test può essere eseguito su campioni di sangue in clinica o presso l'allevamento, senza strumentazione. È possibile utilizzare il test a partire da 28 giorni post-fecondazione. I risultati si ottengono in tempo reale permettendo quindi l'intervento tempestivo e l'ottimizzazione del tasso di gravidanza, della produzione e dei profitti.

**Rapido.** Fino a 30 campioni in meno di 30 minuti, usando semplicemente sangue intero.

**Comodo.** Consente di identificare gli animali vuoti presso l'allevamento o in clinica, con lettura visiva dei risultati.

**Efficiente.** Test e successivo intervento durante la stessa visita presso il cliente.

**Facilità di utilizzo.**

**Economicamente conveniente.** Offre una precisione da laboratorio senza necessità di utilizzare strumentazione di laboratorio.

Leggete e interpretate i risultati visivamente e con facilità

### Gravida (positivo)

I pozzetti appaiono blu.



Risultato positivo

Risultato positivo

### Non gravida (vuota/negativo)

I pozzetti hanno l'aspetto del controllo negativo.



Controllo negativo

Campione negativo

Per maggiori informazioni e per ordinazioni potete rivolgervi ai nostri tecnici di zona:

Per la provincia di Forli/Cesena, Rimini e Ravenna  
- Tonetti Alessandro  
Tel. 335311323

Per la provincia di Bologna, Ferrara e Modena  
- Montanari Davide  
Tel. 3357818235

Per la provincia di Reggio Emilia e Parma  
- Zambelli Carlo  
Tel. 3474527801

Per la provincia di Piacenza  
- Balestra Roberto  
Tel. 3357754796




# Ottimizzazione dei servizi riproduttivi

Una precoce identificazione degli animali vuoti e la continua conferma di quelli gravidi migliorano i tassi riproduttivi ed i profitti dei vostri clienti. Il Test IDEXX Rapid Visual Pregnancy rileva le glicoproteine associate alla gravidanza (pregnancy-associated glycoproteins, PAG) già dopo 28 giorni e per tutta la durata della gestazione.

**Risparmio.** Si stima che la riduzione dei giorni tra un parto e l'altro faccia risparmiare ai produttori lattiero-caseari €5 per bovina al giorno.<sup>1</sup>

**Aumento dei profitti per i produttori.** Una maggiore uniformità nei parti fa aumentare i premi per le mandrie di bovine/vitelli.

**Ottimizzazione del servizio.** Potete fornire i risultati della diagnosi di gravidanza nel rispetto delle tempistiche del programma di ogni cliente, anche quando non potete essere presenti.

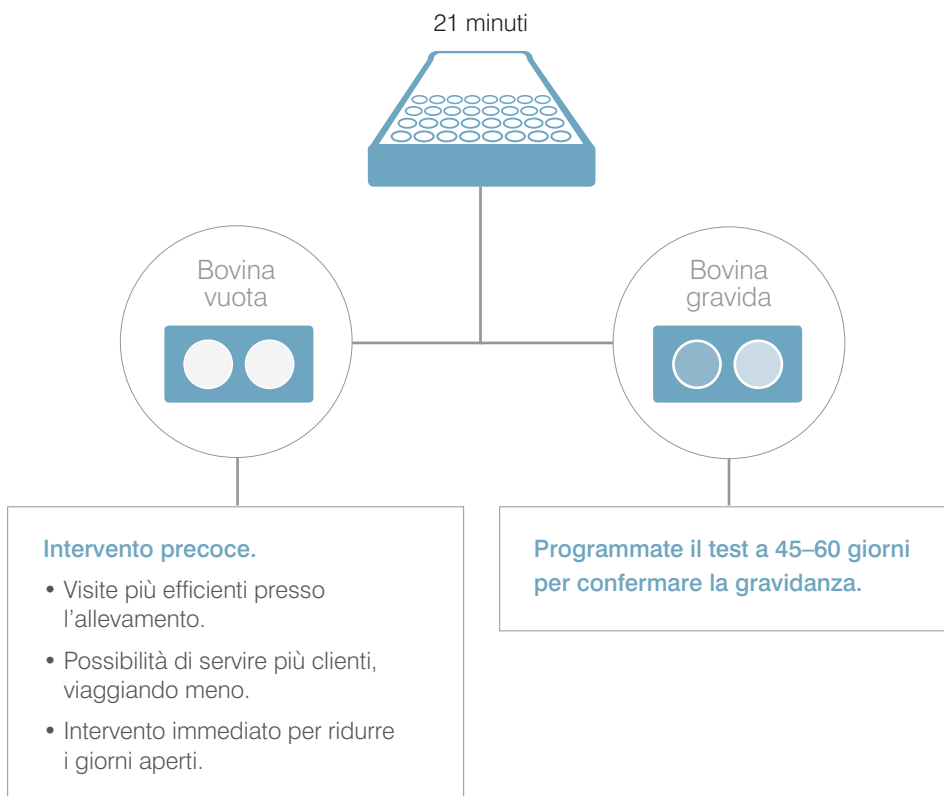

Per maggiori informazioni e per ordinazioni potete rivolgervi ai nostri tecnici di zona:

Per la provincia di Forlì/Cesena, Rimini e Ravenna  
- Tonetti Alessandro  
Tel. 335311323

Per la provincia di Bologna, Ferrara e Modena  
- Montanari Davide  
Tel. 3357818235

Per la provincia di Reggio Emilia e Parma  
- Zambelli Carlo  
Tel. 3474527801

Per la provincia di Piacenza  
- Balestra Roberto  
Tel. 3357754796

## Prestazioni paragonabili a ecografia e palpazione

Sensibilità*	Specificità**
Sangue intero 99,1%	Sangue intero 95,0%
Plasma 98,7%	Plasma 98,9%
Siero 98,4%	Siero 96,5%

Per i dati completi sulle prestazioni del test, consultare il rapporto di validazione di IDEXX Rapid Visual Pregnancy Test.<sup>2</sup>

\* Sensibilità: % di animali gravidi che risultano tali al test

\*\* Specificità: % di animali non gravidi che risultano tali al test

### Test with Confidence™

#### Bibliografia:

1. French PD, Nebel RL. The simulated economic cost of extended calving intervals in dairy herds and comparison of reproductive management programs [Abstract]. *J of Dairy Sci.* 2003;86(suppl 1):54. Citazione di: de Vries A, van Leeuwen J, Thatcher WW. Economics of improved reproductive performance in dairy cattle [Publication AN156]. Gainesville, FL: University of Florida, Institute of Food and Agricultural Sciences; 2005.
2. Dati in archivio presso IDEXX Laboratories, Inc. Westbrook, Maine, USA.

© 2016 IDEXX Laboratories, Inc. Tutti i diritti riservati. • 09-81617-01 • IDEXX, RealPCR e Test With Confidence sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di IDEXX Laboratories, Inc. o delle sue affiliate negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. L'Informativa sulla privacy di IDEXX è disponibile sul sito Web [idexx.com](http://idexx.com).

